

TILLEGGSINFORMASJON:

Projektnummer: _____

OCHORTOPEDI

Oslo1: Innspurten 9, 0663 Oslo. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no **Oslo2:** Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Innlandet: Storgata 121, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 24 73 30. lillehammer@och.no

Østfold1 (Viken): Tuneveien 89, 1712 Grålum. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Østfold2(Viken): Farmannsgate 13 b, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Rogaland: Skårergaten 112 Helsehuset, 5527 Haugesund. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no

Møre og Romsdal: Langelandsveien 17, Daaeskogen Moa, 6010 Ålesund. Tlf: 70 14 50 40. aalesund@och.no

Nord-Norge: Mellomveien 23, 9007 Tromsø. Tlf: 77 60 08 10. post@nnov.no

www.och.no



OCHORTOPEDI

Vi forbedrer menneskers mobilitet og livskvalitet

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift, som i samarbeid med søsterbedrifter, pasienter, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividers livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

Brukerveiledning
ORTOSER FOR ARM OG HÅND

HENSIKT OG FUNKSJON

En ortose er et ortopedisk hjelpemiddel som skal gjenopprette eller bedre en tapt funksjon i hånd og/eller arm. Dette gjøres gjennom korrigerende og stabilisering. Ortoser kan også brukes til avlastning eller motvirke feilstillinger og redusere smerter.

DAGLIG BRUK OG VEDLIKEHOLD

Hjelpemiddelet skal brukes i samsvar med hva som er avtalt med rekvirerende lege, din ortopediingeniør og fysio-/ ergoterapeut. Det er derfor viktig at huden inspiseres etter bruk. Eventuelle trykkmerker skal gå bort etter få minutter. Dersom de ikke forsvinner, så må du ta kontakt med oss for justering.

Det er også viktig med godt vedlikehold og hjelpemiddelet må derfor rengjøres etter behov. Følg anbefalte retningslinjer fra din ortopediingeniør.

VIDERE OPPFØLGING

Når det nye hjelpemiddelet er levert avtales videre oppfølging

Hjelpemiddelet vil over tid bli slitt ved bruk.

Det er viktig å ta kontakt med oss ved spørsmål eller slitasje.

FORNYELSE

Ortoser vil ha forskjellig levetid grunnet individuelle materialvalg og bruksmønster. Dersom du lurte på noe angående fornyelse av ditt hjelpemiddel, vil din ortopediingeniør være behjelpelig og gjøre en vurdering sammen med deg. Ta gjerne kontakt med oss for timeavtale.

RETUR/GJENVINNING

Ortoser som ikke lenger anvendes, kan enten leveres til din ortopediske klinikk eller nærmeste miljøstasjon.

