

## TILLEGGSINFORMASJON:

---



---



---



---



---



---



---

Prosjektnummer: \_\_\_\_\_

# OCHORTOPEDI

**Oslo1:** Jerikoveien 20, 1067 Oslo. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no **Oslo2:** Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

**Oppland:** Storgata 121, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 24 73 30. lillehammer@och.no

**Østfold1:** Farmannsgate 13 b, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

**Østfold2:** Tuneveien 89, 1712 Grålum. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

**Rogaland:** Skårergaten 112 Helsehuset, 5527 Haugesund. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no

**Møre og Romsdal:** Langelandsveien 17, Daaeskogen Moa, 6010 Ålesund. Tlf: 70 14 50 40. aalesund@och.no

**Nord-Norge:** Mellomveien 23, 9007 Tromsø. Tlf: 77 60 08 10. post@nnov.no

[www.och.no](http://www.och.no)



# OCHORTOPEDI

*Vi forbedrer menneskers mobilitet og livskvalitet*

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift, som i samarbeid med søsterbedrifter, pasienter, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividers livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

## Brukerveiledning FOTSENGER

## HENSIKT OG FUNKSJON

Fotsenger er spesiallagede skoinnlegg som er individuelt fremstilt og tilpasset fotens form. De skal korrigere feilstillinger, avlaste ømme områder og/eller fordele belastningen jevnt under hele foten.

## DAGLIG BRUK OG VEDLIKEHOLD

Hjelpemiddelet skal brukes i samsvar med hva som er avtalt med rekvirerende lege og din ortopediingeniør. Når nye fotsenger tas i bruk, vil det alltid være en tilvenningsperiode.

Føttene må sjekkes regelmessig for eventuelle trykkmerker som ikke går bort. Diabetikere og personer med nedsatt sensibilitet må være spesielt oppmerksomme på dette. Fotsengene kan vaskes i mildt såpevann, for så lufttørkes.

## VIDERE OPPFØLGING

Ved levering avtales det kontrolltime dersom det er behov for det. Hjelpemiddelet vil over tid bli slitt ved bruk. Det er viktig at du tar kontakt med oss dersom det skjer forandringer i sykdomsbildet, endringer i kroppsvolum eller vekst.

## FORNYELSE

Fotsengene vil ha forskjellig levetid grunnet individuelle materialvalg og bruksmønster. Dersom du lurer på noe angående fornyelse av ditt hjelpemiddel, vil din ortopediingeniør være behjelpelig og gjøre en vurdering sammen med deg. Ta gjerne kontakt med oss for timeavtale.

