

TILLEGGSINFORMASJON:

Prosjektnummer: _____

OCHORTOPEDI

Oslo1: Innspurten 9, 0663 Oslo. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no **Oslo2:** Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Innlandet: Storgata 121, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 24 73 30. lillehammer@och.no

Østfold1 (Viken): Tuneveien 89, 1712 Grålum. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Østfold2(Viken): Farmannsgate 13 b, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Rogaland: Skårergaten 112 Helsehuset, 5527 Haugesund. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no

Møre og Romsdal: Langelandsveien 17, Daaeskogen Moa, 6010 Ålesund. Tlf: 70 14 50 40. aalesund@och.no

Nord-Norge: Mellomveien 23, 9007 Tromsø. Tlf: 77 60 08 10. post@nnov.no

www.och.no



OCHORTOPEDI

Vi forbedrer menneskers mobilitet og livskvalitet

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift, som i samarbeid med søsterbedrifter, pasienter, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividets livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

Brukerveiledning SPESIALSKO

HENSIKT OG FUNKSJON

Spesialsko er et ortopedisk hjelpemiddel som skal avhjelpe funksjonsforstyrrelser i fot- og ankelregionen, for eksempel fottøy for diabetikere og revmatikere. De er fabrikkmessig framstilt for en diagnose- eller brukergruppe.

DAGLIG BRUK OG VEDLIKEHOLD

Hjelpemiddelet skal brukes i samsvar med hva som er avtalt med rekvirerende lege og din ortopediingeniør. Vær oppmerksom på trykk eller gnag ved bruk av nye sko. Huden må derfor inspiseres etter bruk. Eventuelle trykkmerker skal gå bort etter få minutter. Dersom de ikke forsvinner, må du ta kontakt med oss for kontroll og justering. Diabetikere og personer med nedsatt sensibilitet må være spesielt oppmerksomme på dette.

VIDERE OPPFØLGING

Ved levering avtales det kontrolltime dersom det er behov for det. Det er viktig å ta kontakt med oss dersom det skjer forandringer i sykdomsbildet, endringer i kroppsvolum eller vekst.

FORNYELSE

Fottøyet vil ha forskjellig levetid grunnet individuelle material-valg og bruksmønster. Dersom du lurer på noe angående fornyelse av ditt hjelpemiddel, vil din ortopediingeniør være behjelpelig og gjøre en vurdering sammen med deg. Ta gjerne kontakt med oss for timeavtale.

