

TILLEGGSINFORMASJON:

Prosjektnummer: _____

OCHORTOPEDI

Oslo1: Innspurten 9, 0663 Oslo. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no **Oslo2:** Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Innlandet: Storgata 121, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 24 73 30. lillehammer@och.no

Østfold1 (Viken): Tuneveien 89, 1712 Grålum. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Østfold2(Viken): Farmannsgate 13 b, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Rogaland: Skårergaten 112 Helsehuset, 5527 Haugesund. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no

Møre og Romsdal: Langelandsveien 17, Daaeskogen Moa, 6010 Ålesund. Tlf: 70 14 50 40. aalesund@och.no

Nord-Norge: Mellomveien 23, 9007 Tromsø. Tlf: 77 60 08 10. post@nnov.no

www.och.no



OCHORTOPEDI

Vi forbedrer menneskers mobilitet og livskvalitet

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift, som i samarbeid med søsterbedrifter, pasienter, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividets livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

Brukerveiledning
HOFTEORTOSER

HENSIKT OG FUNKSJON

En hoftortose er et ortopedisk hjelpemiddel som brukes ved hoftedysplasi.

Hensikten er å oppnå optimal plassering av lårbeinshodet i hofteskålen. Lårbeinet skal holdes på plass til leddet er tilstrekkelig utviklet.

DAGLIG BRUK OG VEDLIKEHOLD

Hjelpemiddelet skal brukes i samsvar med hva som er avtalt med rekvirerende lege. Hvor mange timer i døgnet og hvor lenge behandlingen skal foregå, bestemmer ansvarlig lege ut i fra alder på barnet og hvilken grad av hoftedysplasi som foreligger.

Hvis ikke annet er bestemt, brukes ortosen utenpå bleie og tynt tøy. Ved behov kan man bygge opp/utligne høyden under barnets overkropp når det ligger på rygg i sengen.

Det er viktig at huden inspiseres etter bruk. Eventuelle trykkmerker skal gå bort etter få minutter. Dersom de ikke forsvinner, så må du ta kontakt med oss for justering.

Det er også viktig med godt vedlikehold og hjelpemiddelet må derfor rengjøres etter behov. Bruk mildt såpevann og skylt godt, for så å lufttørkes.

VIDERE OPPFØLGING

Ved levering avtales videre oppfølging i samarbeid med rekvirerende lege.

FORNYELSE

Det vil være behov for fornyelse ved slitasje og/eller vekst. Ta gjerne kontakt med oss for timeavtale.

RETUR/GJENVINNING

Ortoser som ikke lenger anvendes, kan enten leveres til din ortopediske klinikk eller nærmeste miljøstasjon.

