

TILLEGGSINFORMASJON:

Prosjektnummer: _____

OCHORTOPEDI

Oslo1: Innspurten 9, 0663 Oslo. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no **Oslo2:** Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Innlandet: Storgata 121, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 24 73 30. lillehammer@och.no

Østfold1 (Viken): Tuneveien 89, 1712 Grålum. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Østfold2(Viken): Farmannsgate 13 b, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 30 17 70. fredrikstad@och.no

Rogaland: Skårergaten 112 Helsehuset, 5527 Haugesund. Tlf: 23 28 82 00. oslo@och.no

Møre og Romsdal: Langelandsveien 17, Daaeskogen Moa, 6010 Ålesund. Tlf: 70 14 50 40. aalesund@och.no

Nord-Norge: Mellomveien 23, 9007 Tromsø. Tlf: 77 60 08 10. post@nnov.no

www.och.no



OCHORTOPEDI

Vi forbedrer menneskers mobilitet og livskvalitet

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift, som i samarbeid med søsterbedrifter, pasienter, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividens livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

Brukerveiledning PROTESER

HENSIKT OG FUNKSJON

En protese er et ortopedisk hjelpemiddel som skal erstatte helt eller delvis tap av en lemsdel.

OCH ortopedi lager proteser for å gjenopprette gangfunksjon. I tillegg kan vi produsere kosmetiske proteser, dusjproteser og spesialproteser til ulike aktiviteter som svømming og løping.

DAGLIG BRUK OG VEDLIKEHOLD

Protesen skal brukes i samsvar med hva som er avtalt med rekvirerende lege, din ortopediingeniør og eventuelt fysioterapeut.

Gnag- og trykksår er en risikofaktor ved protesebruk. Sjekk derfor alltid amputasjonsstumpen og vær oppmerksom på røde merker.

Stumpsokker kan brukes for å kompensere for volumendringer. Dette gjelder særlig nyamputerte, diabetikere og hjerte-/karsyke. Blodfortynnende og vandrivende medisiner kan også føre til væskeansamling.

Hygiene er viktig for vellykket protesebruk. Liner og amputasjonsstump må rengjøres hver kveld.

VIDERE OPPFØLGING

Etter utlevering av protesen settes det opp en eller flere regelmessige kontrolltimer. Slik er du sikret en god oppfølging fra oss. Dette er en god og nødvendig trygghet for deg som bruker og oss som behandlere.

Vi vil anbefale at hjelpemiddelet kontrolleres av oss minimum en gang per år.

Ved akutte problemer må du ta kontakt med oss snarest mulig.

FORNYELSE

Proteser har ulik livsvarighet grunnet individuelle materialvalg og bruksmønstre. Dersom du lurer på noe angående fornyelse av ditt hjelpemiddel, vil din ortopediingeniør være behjelpelig og gjøre en vurdering sammen med deg. Ta gjerne kontakt med oss for timeavtale.

RETUR/GJENVINNING

Proteser som ikke lenger anvendes kan enten leveres til din ortopediske klinikk eller nærmeste miljøstasjon.